


# SOCOREX® SELBSTFÜLLERSPRITZE ULTRA 1810


## Kurzanleitung

### Körperpositionierung

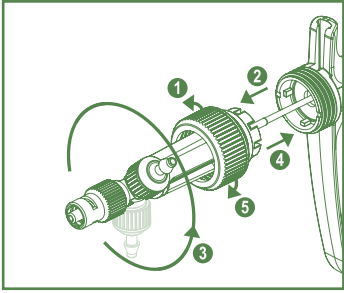


Körperposition ändern.


### Anbringen des Schlauches

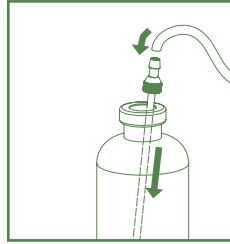

Zulaufnadel anbringen.  
Schlauch anschliessen.

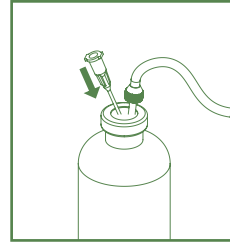


Belüftungskanüle  
anbringen.

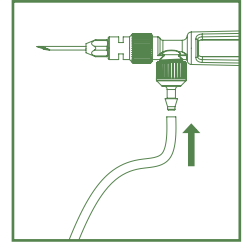


Schlauch an die Spritze  
anschliessen.

### Befüllen

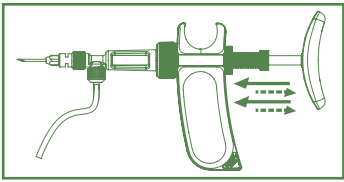


Aktivieren um Flüssigkeit anzusaugen  
und abzugeben.

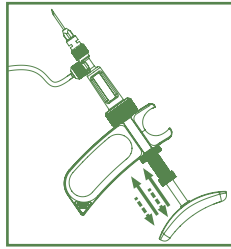


Luftblasen entfernen.


### Volumeneinstellung

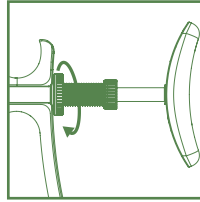

Entriegeln.

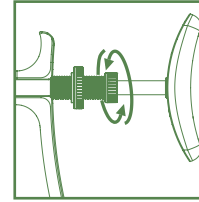


Stutzen drehen um  
Kolben zu verschieben.

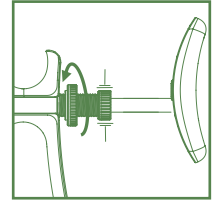


Stutzen halten und  
verschliessen.

### Im Fall eines verstopften Ventils


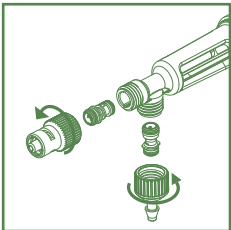


Ventil aufschrauben und  
reinigen. Kein Werkzeug in  
die Ventilkartusche einführen.

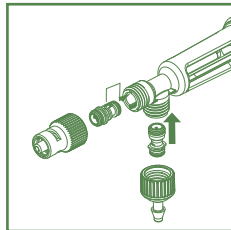


Einbau der Ventilkartuschen,  
welche verwechslungssicher  
codiert sind.

### Ablesen des Volumens

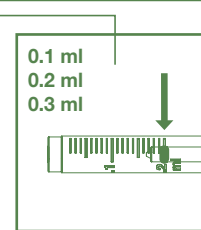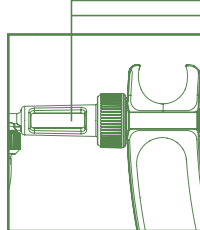


Dichtungsring mittig  
der Graduierung.

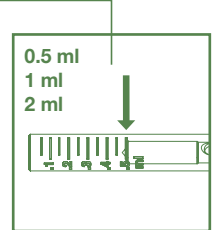


Unterkante des  
Kolbens an der  
Graduierung.

### Durchspülen und Reinigen

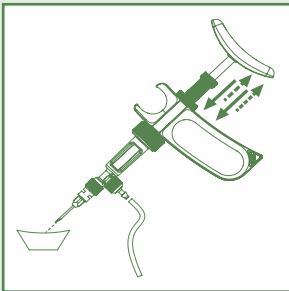

Impfstoff entnehmen und mit  
Wasser/Spüllösung spülen.


### Zerlegen und Reinigen

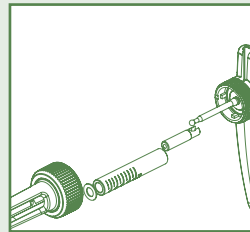


Mutter aufschrauben und Teile trennen.  
Teile reinigen und trocknen.



### Austausch der Kolbendichtung

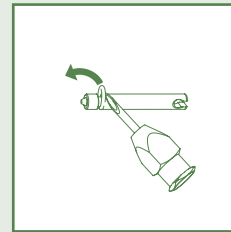


Kolbendichtung vorsichtig  
entfernen.

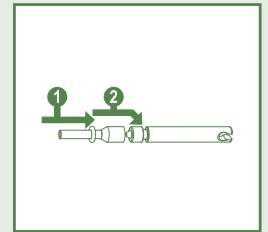


Verwendung der Führung um  
neu geschmierten Dichtungs-  
ring in die Nut einzuführen.


### Zusammenbau

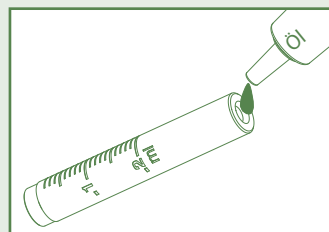

Zylindereinlass schmieren.

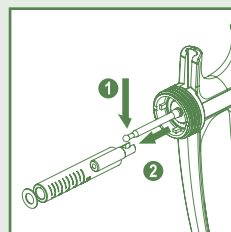

Kolben in den Zylinder  
einführen. Stab verbinden.

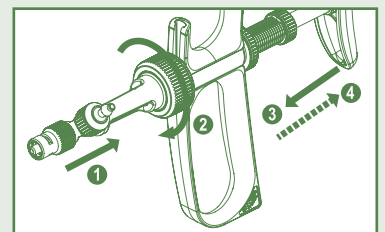

Gehäuse in gedrückter Position verbinden.



I.GUIDE.1810.D – D0223